

a. 1721

Kettner G. m. b. H.

# Selbsthaltendes Bade-Speculum

nach Dr. Eugen Guttman, Frauenarzt in Berlin - Charlottenburg  
D. R. G. M. und D. R. P. ang.

**Unentbehrlich für jede Dame, die auf Reinlichkeit und Hygiene Wert legt**

Kein Reinigungs-

bad mehr ohne Bade-Speculum

**Ohne Reinlichkeit  
keine Gesundheit!**

**Im Sitzbad  
Im Vollbad  
Bei Spülungen**

**Ohne Gesundheit  
keine Schönheit!**


Preis 18,50 M.

Preis 18,50 M.



Geschlossen zur Einführung

**Resflose Umspülung der gesamten Scheide und des Scheideneinganges**

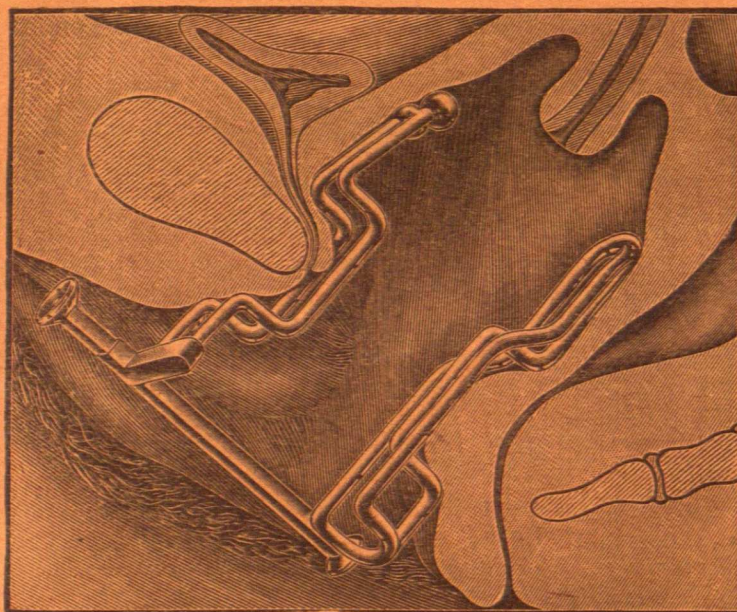

**Vollständige  
Entfaltung der  
Schleimhaut**

**Zu Heilzwecken**

**Für  
medizinische  
Bäder**

**Zur  
Reinhaltung  
und Hygiene**

**Zur  
Bekämpfung  
des Weißflusses**

Eingeführt und aufgespannt

**Leichte, schmerzlose Handhabung!**

**Nach kurzem Gebrauch wird der Apparat kaum mehr gespürt!**



Die Bade-Behandlung der Scheide ist für die Frau von ungemeiner Wichtigkeit. Die zersetzten Sekrete verursachen üble Gerüche und führen nicht nur zu örtlichen Krankheiten, sondern auch zu Schädigungen der Gesundheit, die sogar den ganzen Körper in Mitleidenschaft ziehen. Die Fäulnisstoffe der zersetzten Sekrete werden durch die Schleimhaut aufgesogen und vergiften das Blut. Schlafe, ungesunde Haut, tiefe Augenränder und allgemeine Schwäche sind die äußeren Anzeichen solch einer Unterleibsstörung. Reinlichkeit und Hygiene dagegen straffen die Haut, machen sie gesund und geben den Augen einen jugendfrischen Blick.

## Also durch Reinlichkeit zur Gesundheit, durch Gesundheit zur Schönheit!

Es gibt vielartige Apparate zur intimen Hygiene, die aber bis jetzt noch nichts ideales darstellen. Spülungen mit Irrigatoren und Frauenduschen haben ohne das Bade-Speculum nach Frauenarzt Dr. Eugen G u t t m a n n nur einen geringen Reinlichkeitswert, weil sie, da die weibliche Scheide normalerweise in Falten eng zusammenliegt, nur die Schleimhautfalten reinigt, die zufällig vom Wasserstrahl getroffen und dadurch entfaltet werden. Bei geringem Wasserdruck findet sogar nicht einmal eine Entfaltung statt. Eine wirklich einwandfreie Reinigung ist daher nur mit Hilfe des Bade-Speculum nach Frauenarzt Dr. Eugen G u t t m a n n in einem Bade denkbar, weil dann genügend Wassermengen die Schleimhaut durchspülen und auf die Schleimhaut längere Zeit einwirken können. Ein flüchtiger Wasserstrahl kann natürlich eine derartige Reinigung niemals erreichen. Spülungen sollte man daher nur vornehmen, wenn Zeit und Gelegenheit zum Voll- oder Sitzbad fehlen, dann aber nur unter Anwendung des Bade-Speculum nach Frauenarzt Dr. Eugen G u t t m a n n, damit wenigstens durch die Entfaltung der Scheide eine einigermaßen wirksame Reinigung erzielt wird.

Erst kürzlich hat Herr Professor P i n k u s s eine Spülflüssigkeit PLANTA FLUID\*) gegen Weißfluß hergestellt, die im Zusammenhang mit diesem Bade-Speculum äußerst schnelle Heilwirkung verspricht, weil dieses Mittel die natürliche Widerstandsfähigkeit der Scheide günstigst unterstützt. Andere Spülmittel und Bade-Zusätze sind Salze und Teeaufgüsse, die von Fall zu Fall der Arzt verordnen muß.

### Gebrauchs-Anweisung

1. Einführung des geschlossenen Bade-Speculum bei entspannter Bauchmuskulatur mit dem Führungs-Stabe nach oben nach Spreizung der Schamlippen.
2. Man legt zwecks Aufspannung den Zeigefinger auf die Griffplatte im Innern des Speculum und den Daumen auf die Griffplatte am oberen Ende des Führungsstabes und kann dann durch leichten Druck bei entspannter Bauchmuskulatur das Speculum so weit aufspannen, wie es ohne Behinderung möglich ist. Bei zu trockener Scheide empfiehlt es sich, das Speculum anzufeuchten.
3. Die Herausnahme ist denkbar einfach. Man legt den Zeigefinger auf die untere Griffplatte der Führungsstange unterhalb des Speculum und drückt mit dem Daumen auf den Ring, bis das Speculum in sich zusammenfällt.
4. Durch Zug an dem Ring kann das Speculum nunmehr leicht herausgezogen werden.

\*) PLANTA FLUID wird hergestellt von der chemischen Fabrik Max Loebinger & Co. A.-G., Berlin-Schöneberg, Kolonnenstraße 29.