

C.D.

INDICATOR

**Die unentbehrliche Hilfe für jede Frau
zur fehlerlosen Auswertung der bedeutendsten
physiologischen Entdeckung unserer Zeit**



Ein Geschenk der Wissenschaft



Der C. D. Indicator ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk der Wissenschaft für die Frau. In der ganzen Welt gestalten unzählige Frauen damit ihr Leben freier und glücklicher.

Wissenschaftlern unserer Zeit blieb es vorbehalten, durch die Entdeckung des Gesetzes über die periodische Konzeptionsfähigkeit der Frau einen Wunschtraum der Menschheit zu verwirklichen. Die Mutterschaft wird der Willkür des Zufalls entzogen. Jede Frau hat ihr Schicksal selbst in der Hand. Der C. D. Indicator setzt diese neuen Erkenntnisse in die Praxis um.

Die revolutionierende Entdeckung der weltberühmten Wissenschaftler Dr. Ogino, Prof. Knaus und Dr. Smulders, wonach die Frau nur an wenigen, bestimmten Tagen eines jeden Monats ein Kind empfangen kann, eröffnet einen vollkommen neuen Aspekt im Leben der modernen Frau. Die Zeiten, wo eine Geburt dem reinen Zufall überlassen werden mußte, sind endgültig vorbei.

Mit Hilfe des C. D. Indicators wird jede gesunde Frau in die Lage versetzt, ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage jeden Monat im voraus genau zu wissen, gleichwohl, ob die Menstruationen in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen oder nicht.

Was besagt das neuentdeckte Gesetz?

Dieses Gesetz besagt nichts weniger, als daß die Frau nur kurze Zeit in ihrem monatlichen Zyklus empfangen kann. Es räumt mit der seit unzähligen Generationen bestehenden falschen Vorstellung auf, wonach die Frau jederzeit fruchtbar sei.


Welches sind die Grundlagen dieses Gesetzes?

Allmonatlich löst sich aus dem Eierstock der Frau eine Eizelle, die zur Befruchtung reif ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß eine Eizelle nur eine Lebensdauer von einigen Stunden hat. Die Befruchtungsfähigkeit des männlichen Samens wurde mit 48 Stunden ermittelt. Es ist klar, daß nur dann eine Empfängnis eintreten kann, wenn ein befruchtungsfähiger Same ein lebendes Ei antrifft. Wenn wir also den Tag des Eisprungs, den sogenannten Ovulationstermin, bestimmen können, so haben wir auch diejenigen Tage des Menstruationszyklus erfaßt, an denen eine Empfängnis überhaupt möglich ist. In der ganzen übrigen Zeit ist eine Empfängnis ausgeschlossen. Dank der modernen Wissenschaft kann heute der Ovulationstag auf Grund der Daten von vorhergehenden Menstruationszyklen ermittelt und die fruchtbare Zeit unter Berücksichtigung der Lebensdauer des weiblichen Eies und des männlichen Samens bei Miteinschluß von Sicherheitstagen genau errechnet werden. Alle diese Berechnungen leistet der C. D. Indicator jetzt augenblicklich und automatisch für Sie.

Was ist nun der C. D. Indicator?

Der C. D. Indicator ist ein kleines Präzisionsinstrument, das jede gesunde Frau in die Lage versetzt, auf wissenschaftlich exakte Weise ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage im voraus zu bestimmen. Der C. D. Indicator schließt jeden Rechenfehler aus und berücksichtigt automatisch die Unregelmäßigkeiten im Menstruationszyklus.

Das Bild zeigt den C. D. Indicator im Gebrauch. Der Apparat läßt sich mit einem Handgriff individuell einstellen und zeigt augenblicklich die Tage, die Sie wissen möchten.

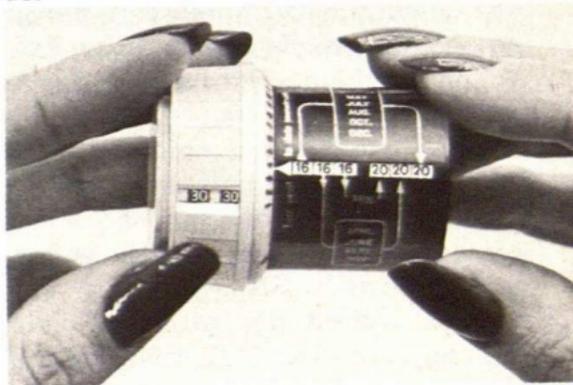



Die oft schwerwiegenden Irrtümer, welche bei der Berechnung der fruchtbaren Tage anhand von Büchern oder Rechenschiebern usw. entstehen, sind mit dem C. D. Indicator vollkommen ausgeschlossen. Das ist einer der Gründe, neben einfachster Bedienung und augenblicklicher Ablesbarkeit der fruchtbaren Tage, weshalb der C. D. Indicator von dem weltberühmten Entdecker der Methode, Dr. Ogino selbst, und von anderen Wissenschaftlern begutachtet und empfohlen wird und weshalb Ärzte, Psychologen,

Eheberatungsstellen in aller Welt den Frauen zu dem C. D. Indicator raten. Es gibt keinen Ersatz für den C. D. Indicator. Auch die katholische Kirche sieht in der Verwendung der Methode eine erlaubte Handlung.

Es gibt kein Beispiel dafür, daß ein preisgünstiger Gegenstand so viel den Menschen geboten hätte wie der C. D. Indicator. Verbannt ist für immer die quälende Ungewißheit, welche fast jede Ehe trübt und Frau und Mann um das Kostbarste in der Liebe schmälert. Viele Frauen erleben durch den C. D. Indicator zum erstenmal das Hochgefühl eines von Hemmungen befreiten Zusammenseins.

Verblüffend einfache Bedienung

Die Bedienung des Apparates ist denkbar einfach. Vor Benützung stellt die Frau den Apparat auf ihren eigenen Zyklus ein. Die ausführliche und mit Bildern versehene Gebrauchsanweisung zeigt, wie leicht das ist. Von nun an hat man nichts anderes zu tun, als jeden Monat den Pfeil des Apparates auf das Datum einzustellen, an dem die Menstruation begonnen hat – was im Bruchteil einer Sekunde geschehen ist –, und schon erscheinen im Fenster des Apparates die Tage, an denen die betreffende Frau empfängnisfähig ist. An allen übrigen Tagen kann keine Empfängnis stattfinden.

Der C. D. Indicator entstand in enger Zusammenarbeit von Technikern und Gynäkologen von Weltruf. Als er im Mai 1952 zum ersten Male bei dem 5. Klinischen Kongreß der Gynäkologen in Cincinnati (USA) vorgeführt wurde, fand er begeisterte Aufnahme. Neben der großen Schar von Frauen in aller Welt, welche nach dem C. D. Indicator leben, verwenden ihn Tausende von Fachärzten in ihrer Praxis zur Beratung der Patientinnen.

C. D. Indicator ist heute eine Selbstverständlichkeit für jede Frau

Ob Sie sich ein Kind wünschen, oder ob Sie die Schwangerschaft auf einen späteren Zeitpunkt verlegen möchten, Sie dürfen auf den C. D. Indicator nicht verzichten. Nur die Menschen, welche dank dem C. D. Indicator ein natürliches Eheleben führen, wie es die Natur diktiert, wissen, was dies bedeutet. Kein Gefühl mehr des Unbefriedigtseins aus steter Angst und Sorge. Keine unromantischen Schutzmethoden, welche oft jedes Gefühl töten und auf die Dauer die Gesundheit gefährden. Wenn eine Empfängnis nicht erwünscht ist, so hat man nur die wenigen Tage zu meiden, welche durch den C. D. Indicator als fruchtbar angezeigt werden. Wenn keine moralischen Bedenken dagegen bestehen, um in Ausnahmefällen während der fruchtbaren Zeit eine Schutzmethode anzuwenden, so dürfte dies keine gesundheitsschädlichen Folgen haben.

Und wenn Sie sich ein Kind wünschen . . .

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, daß Sie ein Kind haben wollen, dann sollten die günstigsten Voraussetzungen geschaffen werden, damit Ihr Kind die bestmöglichen körperlichen und geistigen Erbanlagen erhalte. Es wird jedem einleuchten, daß die Erbanlagen des Kindes von der physischen und psychischen Kondition der Eltern in dem Zeitpunkt des Zeugungsaktes entscheidend beeinflußt werden. Nur durch eine bewußte Zeugung, welche durch den C. D. Indicator auf die einfachste Weise ermöglicht wird, können diese Erkenntnisse zum Wohl einer gesunden Nachkommenschaft in jeder Ehe verwertet werden. **Ehepaare, welche über diese Möglichkeit, die heute die moderne Wissenschaft bietet, informiert sind, können es kaum mehr verantworten, nicht ihr Bestmögliches für ihr zukünftiges Kind zu tun.**

Die Bedeutung der bewußten Elternschaft geht weit über den Rahmen der Familie und wird bestimmend sein für die zukünftigen Generationen.

Mit dem C. D. Indicator lassen sich auch kurz hintereinanderfolgende Schwangerschaften (wovon strengstens abzuraten ist) mit Sicherheit vermeiden wie auch Geburten in den heißen Sommermonaten.

Wenn eine Schwangerschaft erwünscht wird, soll der Zeugungsakt in der Mitte der durch den C. D. Indicator angezeigten

fruchtbaren Zeit und in der besten körperlichen und seelischen Kondition der beiden Ehepartner stattfinden. Die günstigsten Voraussetzungen zur Empfängnis sind bei einer vorherigen 10- bis 15tägigen Enthaltbarkeit des Ehemannes gegeben. Dankschreiben bei unseren Vertretungen in der ganzen Welt zeugen dafür, daß in Sterilitätsfällen, wo jahrelang alle Mittel und Ratschläge versagt haben, oft gleich im ersten Monat durch die Befolgung der erwähnten Anweisung die Schwangerschaft eingetreten ist.

Auch die Schönheit wird günstig beeinflusst

Nicht unerwähnt darf es bleiben, worauf der bekannte englische Arzt J. Lyle Cameron besonders hinweist, daß auch die körperliche Entwicklung und Schönheit der Frau durch das natürliche Eheleben außerordentlich günstig beeinflusst wird. Zur vollen Blüte einer Frau bedarf es der Hormone des ungehinderten Eheaktes und auch der ausgeglichenen und befriedigten Atmosphäre des natürlichen Ehelebens.



C.D.Indicator-Beratungsstelle am Festival of Women in London

Über die Empfängnisverhütung

Alle Verhütungsverfahren mit mechanischen oder chemischen Mitteln sind widernatürlich, weil sie in die Natur des Geschlechtsverkehrs eingreifen und die beiden Geschlechtspartner in ethischer, ästhetischer und hygienischer Hinsicht mehr oder weniger tief verletzen. Die Sicherheit der hiermit angestrebten Empfängnisverhütung läßt viel zu wünschen übrig, sie beträgt auch bei der heute als die verlässlichste geltende Methode, nämlich die der Pessare in Kombination mit Gelees, nicht mehr als 85 bis 95 Prozent.

Mit der Entdeckung der kurzfristigen Empfängnisfähigkeit der Frau ergibt sich ganz von selbst die verlässlichste, natürliche und daher wahre Lösung des großen Problems der Empfängnisverhütung.

Es ist ja klar, daß eine Entdeckung von solcher Tragweite nicht ohne weiteres hingenommen wird. Ärzte, wissenschaftliche Anstalten der ganzen Welt haben in jahrelanger, mühsamer Arbeit die Theorie von Ogino-Knaus-Smulders nachgeprüft und die fast ans Unglaubliche grenzende Sicherheit dieser Methode vollauf bestätigt. Müßte man doch bei den besten Verhütungsmitteln mit einem Fehlschlag von mindestens 5 von 100 Fällen rechnen, so zeigt es sich hier, daß bei weit über 10 000 Fällen nicht ein einziger Fehlschlag vorkam, vorausgesetzt, daß die Methode auch korrekt angewendet wurde.

Als die Öffentlichkeit durch die Tagespresse von diesen Tatsachen erfuhr — wie es auch nicht anders zu erwarten war —, begannen viele Leute nach der neuen Methode zu leben. Leider aber allzu bald stellten sich auch die Enttäuschungen ein, denn die oberflächliche, aus Zeitungen oder Büchern entnommene Kenntnis der Berechnungsmethode genügte ebensowenig wie die rasch und geschäftstüchtig in den Handel gebrachten Tabellen und Rechnungsbehalte.

Das Erscheinen des C.D. Indicators auf dem Weltmarkt brachte erst die vollkommene Wendung. Dieser einfach zu bedienende Apparat, welcher auf den individuellen Zyklus von jeder Frau einstellbar ist, folgt immer und unter allen Umständen **hundertprozentig genau** der wissenschaftlichen Methode. Diese Tatsache ist durch die weltberühmten Entdecker der Methode schriftlich bestätigt wie auch von unzähligen Ärzten aus aller Welt.

sogar in Fällen anwendbar ist, bei welchen eine Schwangerschaft laut Vorschrift des Arztes absolut vermieden werden soll. Bis zum heutigen Tag ist **nicht ein einziger Fall bekannt**, bei welchem bei richtiger Anwendung eine Schwangerschaft in der sterilen Periode eingetreten ist.»

Dr. A. Campos, Präsident des Exekutivkomitees des Welt-rates für Fruchtbarkeit:

«Die fruchtbare Zeit der Frau kann dank dem C. D. Indicator exakt und sehr leicht bestimmt werden.»

Vox Medicorum:

«Die praktische Anwendung der Methode in streng wissenschaftlicher Weise hat gezeigt, daß während der sterilen Zeit eine Schwangerschaft **niemals eingetreten ist**. Wir haben nun ein sicheres Mittel, um eine Schwangerschaft zu vermeiden.»

Französische Revue für Gynäkologie und Geburtshilfe:

«Wir können mit Bestimmtheit sagen, daß heute schon Millionen von Fällen während der verschiedensten Menstruationszyklen und unter den größten Variationen von Umständen Beweis für die Verlässlichkeit der Methode bieten.»

Dr. med. H. J. G., Schweiz:

«Der mir zur Begutachtung zugestellte Apparat C. D. Indicator zur Feststellung der fruchtbaren Tage ist endlich die Erfindung, auf welche die Frauenwelt gewartet hat...»

Dr. med. H. K., Schweiz:

«Ich finde den Apparat vortrefflich. Endlich ist es uns möglich, den konsultierenden Frauen etwas in die Hand zu geben, das ihnen Sicherheit gibt und einfach zu bedienen ist.»

Gesundheitsamt der Stadt Köln, Frauenärztliche Gesundheitsfürsorge:

«Es handelt sich um eine ausgezeichnete Konstruktion, die man in der Eheberatung gebrauchen und auch den Ehepaaren sowohl zur Errechnung des Empfängnis-optimums als auch zur Errechnung der empfängnisfreien Tage verordnen kann...»

**Elisabeth-Krankenhaus, Frauenklinische Abteilung, Chef-
arzt Dr. L. Ostendorf:**

«Der Apparat ist wirklich ein Wunderwerk der Technik, dessen Präzision bei jeder Einstellung immer wieder überrascht, so daß man ihn nur wärmstens empfehlen kann.»

Frauenarzt Dr. L. O., Essen:

«... Bitte mir einen weiteren Indicator für die Sprechstunde zuzusenden, damit ich ihn auch hier dauernd empfehlen kann.»

Dr. Waldy Tostes, Dozent an der Universität Brasilien:

«Die Anwendung der Ogino-Knaus-Methode wird durch den C.D. Indicator überaus einfach gemacht, welchem Umstand er seine große Verbreitung verdankt.»

Dr. Cecilia Delgado Ferreira, Frauenspital, Buenos Aires:

«Ich erkläre den C.D. Indicator-Apparat als einen großen Erfolg für die Genitalphysiologie der Frau.»

**Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,
London W 1:**

«Es ist kein Zweifel, daß solch ein Behelf für die Berechnung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau von großem Nutzen ist...»

**Und was sagen die glücklichen C. D. Indicator-
Besitzerinnen?**

Frau R. B., Luzern:

«Seit fünf Jahren bin ich glückliche Besitzerin eines C. D. Indicators... Ich möchte den Indicator nicht mehr vermissen. Seitdem ich diesen wertvollen Apparat besitze, bin ich mit meinen Nerven viel besser daran...»

Frau Dr. E.,

«Ich bin im Besitze eines C. D. Indicators seit 1952... bin mit dem Apparat sehr zufrieden und werde ihn gerne weiterempfehlen.»

Mrs. M. S., USA:

«Wir danken Ihnen sehr für den C. D. Indicator; meine Frau und ich sind sehr glücklich damit.»

Mrs. D. B., USA:

«Der C. D. Indicator ist sein Gewicht in Gold wert.»

Mrs. P. E., USA:

«Der C. D. Indicator bedeutet ein Glück für mich. Ich fand ihn hundertprozentig sicher. Ich bin mehr als zufrieden und sage es auch allen Freunden.»

Mrs. B. N. Winchcombe, England:

«Ich bin seit sieben Jahren verheiratet und habe drei Kinder. Während all dieser Jahre lebten wir nach dem Indicator, mit vollem Erfolg. Mein Mann und ich freuen uns sehr, Ihre Inserate, welche diesen so wichtigen Apparat weiten Kreisen bekanntmachen, zu sehen. Dieser bietet wirklich die allergrößte Hilfe.»

Mrs. T. J. C., Strathfield, Australien:

«Vor etwa zwei Jahren haben wir einen C. D. Indicator gekauft, und es ist für uns eine besondere Freude, Ihnen sagen zu können, wie sehr wir mit diesem Apparat zufrieden sind. Auch vielen Freunden haben wir dies mitgeteilt.»

Mrs. E. B. E., Nairobi:

«Ich benütze den C. D. Indicator seit drei Jahren mit vollem Erfolg. Ich hatte zwei Kinder und durfte gesundheits halber kein drittes haben. Man hat mir den C. D. Indicator empfohlen, und ich muß sagen, daß er von Gott gesandt wurde . . .»

Mrs. R. R., New York Bronx:

«Hiermit möchte ich Ihnen für unser Glück danken, daß wir unser wundervolles Baby, Michael, erhalten durften. Es schien für uns während unserer siebenjährigen Ehe nicht möglich, ein Kind zu bekommen. Diesbezüglich haben wir viele Ärzte vergeblich konsultiert, bis einer uns endlich den C. D. Indicator verordnete. Dies war die glücklichste Stunde meines Lebens. Gott segne Sie und Dr. S., welcher unsere Aufmerksamkeit auf dieses Instrument lenkte . . .»

Es ist unmöglich, die unzähligen, ähnlich lautenden Dankschreiben, welche täglich bei unseren Vertretungen in aller Welt eintreffen, wiederzugeben.

Doch schon diese wenigen Beispiele zeigen, was der C. D. Indicator für die moderne Frau bedeutet.

Die Begeisterung, welche der C. D. Indicator in der Frauenwelt hervorruft, findet ihre Erklärung vor allem in der durch ihn gebotenen Sicherheit, welche alle bisherigen Mittel um das Vielfache überbietet, ohne die Schädlichkeit der letzteren in Kauf nehmen zu müssen.

Alle Kirchen und Religionen geben ihre Zustimmung

Seine Heiligkeit Papst Pius XII.

hat in mehreren Reden und in verschiedenen Publikationen kundgetan, daß die Anwendung der Methode nicht gegen die moralischen Grundsätze der katholischen Kirche verstößt.

Bischof George Craig Stewart, Chikago:


«Ich lege besonderen Wert darauf, daß alle Pfarrer der Diözese sich mit der Theorie von Ogino/Knaus bekanntmachen, damit sie diese in ihrer seelsorgerischen Tätigkeit empfehlen können. Ich mache dieselbe Empfehlung auch an alle Sozialarbeiter der Diözese, und zwar sowohl für Verheiratete wie auch für jene, welche zu heiraten beabsichtigen, besonders aber auch für junge Paare, die aus finanziellen Gründen oder weil ihnen die schädlichen und verwerflichen Praktiken der Empfängnisverhütung widerstreben, nicht zu heiraten trauen.»

Pfarrer E. B., Rio de Janeiro:

«Ich werde mein Möglichstes tun, um den C. D. Indicator sowohl in Rio wie auch im Innern des Landes zu empfehlen. Ich will den Leuten helfen, welche einer gesunden moralischen Aufklärung bedürfen.»

Pfarrer O. B., Horizonte-Minas:

«Ich beglückwünsche Sie zu Ihren aufrichtigen Bemühungen, den Menschen zu helfen, welche gemäß der katholischen Moral zu leben wünschen.»

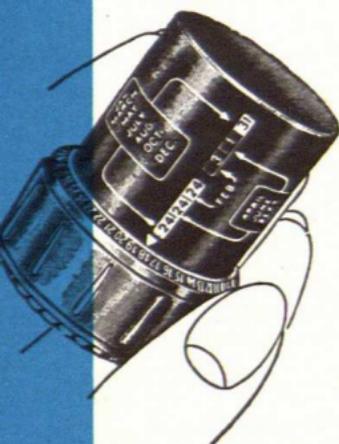

**Weitere Dankschreiben in großer Anzahl
aus allen Ländern**

**C. D. Indicator-Vertriebszentralen in der
ganzen Welt**

Patente in allen Kulturstaaten

C. D. Indicator AG, Zürich, Gartenstr. 38

a 1761