

# OvulaRing

Die Bestimmung der fruchtbaren Tage war noch nie so einfach!



✓ Einfach ✓ Präzise ✓ Natürlich ✓ Hormonfrei

## Was ist OvulaRing?

Mit OvulaRing steht Ihnen eine der einfachsten und modernsten Methoden zur Bestimmung Ihrer fruchtbaren Tage zur Verfügung.

**Natürliche Familienplanung war noch nie so einfach!**


Mit nur einem Handgriff pro Zyklus wird rund um die Uhr die Temperatur ihres Körperkerns aufgezeichnet und mit einer webbasierten Software ausgewertet. Aus den präzise gemessenen Daten wird Ihr ganz persönliches Fruchtbarkeitsfenster mit individueller Eisprungprognose erstellt.

**Ideal zur natürlichen Verhütung oder für das beste Timing bei anstehendem Kinderwunsch!**

## Was sind die Vorteile von OvulaRing?

- ✓ **OvulaRing ist präzise und zuverlässig!** Der Sensor misst im Körperinneren unabhängig von äußeren Einflüssen. Er ermittelt durch die Vielzahl der erhobenen Daten (288 Messpunkte täglich) exakt Ihr persönliches Fruchtbarkeitsfenster.
- ✓ **OvulaRing ist einfach und alltagstauglich!** OvulaRing kann selbständig ohne ärztliche Hilfe angewendet werden. Lästiges morgendliches Temperaturmessen entfällt.
- ✓ **OvulaRing ist natürlich und nicht spürbar!** Der Ring ist frei von Weichmachern und Hormonen. Der flexible Kunststoff passt sich ideal dem Körper an und der hohe Tragekomfort wurde in Studien bewiesen.
- ✓ **OvulaRing ist für jede Frau geeignet!** Auch bei unregelmäßigen, langen oder kurzen Zyklen erfolgt eine exakte Darstellung der fruchtbaren Tage.
- ✓ **OvulaRing ist webbasiert!** Somit sind Ihre Zyklusinformationen überall und jederzeit verfügbar.

## Woraus besteht OvulaRing?

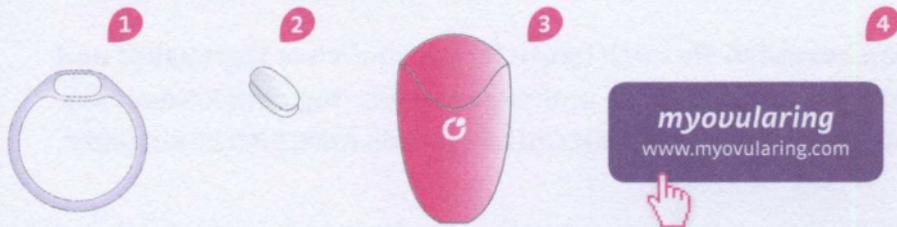

Das Temperaturmess-System von OvulaRing besteht aus einem Kunststoffring (1), einem Temperatursensor (2), einem Lesegerät (3) und der Auswertungsmöglichkeit mittels der webbasierten Software **myovularing** (4).

## Wie wird OvulaRing angewendet?



OvulaRing wird ähnlich einfach wie ein Tampon benutzt. Der Ring besteht aus einem flexiblen Kunststoff und kann leicht zusammengedrückt tief in die Scheide eingeführt werden. Ärztliche Hilfe wird dazu nicht benötigt. Im Körperinneren misst der Sensor im Fünf-Minuten-Takt den Temperaturverlauf und speichert diesen.

Für das Auslesen der Daten wird der Sensor in das Lesegerät eingefügt, welches mittels USB-Kabel an den Computer angeschlossen wird. Über den persönlichen Zugang auf **www.myovularing.com** werden die Daten hochgeladen und ausgewertet. Die Anwenderin erhält dann ein umfangreiches Abbild ihres Zyklus mit persönlichem Fruchtbarkeitsfenster.

## ***Wir konnten Sie von OvulaRing überzeugen?***

**Dann bestellen Sie noch heute Ihr persönliches Startpaket und sparen Sie 20%! Einfach unter [www.ovularing.com](http://www.ovularing.com) Produkt auswählen und beim Checkout Gutscheincode **RINGPROBE** eingeben.**



Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen, dann besuchen Sie uns auf [www.ovularing.com](http://www.ovularing.com) oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: [service@ovularing.com](mailto:service@ovularing.com).



**OvulaRing finden Sie auch auf Facebook und Google+**

